

Konfektionierte Wurzelstifte

Titanstifte



Dieses Wurzelkanal-Aufbausystem ist für den Front- und Seitenzahnbereich geeignet. Die Wurzelstifte werden aus biokompatiblen Titanlegierungen hergestellt. Das Material garantiert einen problemlosen Einsatz, selbst bei sensiblen Patienten.

Drei Größen in je 2 Längen erleichtern den individuellen Einsatz bei jedem Patienten. Die Stifte werden mit einem Spezialverfahren sandgestrahlt. Das garantiert die sichere Haftung von Zement und Kunststoff. Die zierlichen Köpfe geben einen sehr guten mechanischen Halt und lassen ausreichend Platz für die gewünschte anatomische Formgestaltung.

Vor Anwendung:

Systeme desinfizieren, spülen, trocknen und sterilisieren im Autoklav bei 134°, Druck 2,1 bar, Zeit 5 Min.

Vorbohrer Drehzahl max. 1.000 UpM

- endodontische Behandlung der Zahnwurzel
- Entfernung der Wurzelfüllung
- mit dem Erweiterer die Wurzel aufbereiten
- Passbohrung bis zur geplanten Tiefe durchführen
- Bohrtiefe durch Röntgenaufnahme oder Messung überprüfen

Planfräser Drehzahl max. 2.000 UpM

- Wurzelstumpfoberfläche mit leichtem Druck (ca. 1 mm tief) glatt abtragen

Stift einschrauben

- mit Steckschlüssel Titanstift in den Wurzelkanal eindrehen und das Gewinde schneiden, dabei zur Entfernung der Späne vorsichtig vor- und zurückdrehen

Stift einzementieren

- Wurzelkanal reinigen und desinfizieren
- Kanal mit Zement füllen
- Zement auf Stiftschaft auftragen
- Titanstift in den Wurzelkanal vorsichtig eindrehen

Kernaufbau mit plastischem Füllungsmaterial, z. B. Composite

Titanstifte
- aktiv mit Kopf -



| Titanstifte | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| D (mm): | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| L (mm): | | 6 | 13 | 7 | 13 | 9 | 13 |
| DH (mm): | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| H (mm): | | 2,75 | 2,75 | 3,85 | 3,85 | 4,9 | 4,9 |
| Artikel Nr.: | | 6210 | 6211 | 6212 | 6213 | 6216 | 6217 |
| | (10 Stifte Nachfüllpackung) | | | | | | |

| Sortiment | Artikel Nr.: | 6202 | 6203 | 6204 | 6205 | 6208 | 6209 |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | (Im Set: 10 Stifte; 1 Vorbohrer; 1 Peeso-Bohrer; 1 Planfräser; 1 Steckschlüssel) | Sortiment | Sortiment | Sortiment | Sortiment | Sortiment | Sortiment |



UpM (max):
1.200

| Peeso-Bohrer | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| D (mm): | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| L (mm): | | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 |
| Artikel Nr.: | | 183.15.090 | 183.19.090 | 183.15.110 | 183.19.110 | 183.15.130 | 183.19.130 |
| | (6 Peeso-Bohrer) | | | | | | |



UpM (max):
1.000

| Vorbohrer | | | | | | | |
|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| D (mm): | | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,65 | 1,65 |
| L (mm): | | 9 | 16 | 10 | 16 | 12 | 16 |
| Artikel Nr.: | | 6320 | 6321 | 6322 | 6323 | 6326 | 6327 |
| | (3 Vorbohrer) | | | | | | |



UpM (max):
2.000

| Planfräser | | | | |
|--------------|----------------|------|------|------|
| DH (mm): | | 3 | 3,5 | 4 |
| L (mm): | | 4 | 4 | 4 |
| D (mm): | | 1,1 | 1,3 | 1,55 |
| Artikel Nr.: | | 6330 | 6331 | 6333 |
| | (3 Planfräser) | | | |



| Steckschlüssel | | | | |
|----------------|----------------|------|------|------|
| Artikel Nr.: | | 6350 | 6351 | 6353 |
| | (3 Steckschl.) | | | |

Titanstifte
- aktiv ohne Kopf -



| Titanstifte | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | D (mm): | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| | L (mm): | 8,25 | 16,5 | 10,85 | 16,5 | 13,85 | 16,5 |
| Artikel Nr.: (10 Stifte Nachfüllpackung) | 6110 | 6111 | 6112 | 6113 | 6114 | 6115 | |
| Sortiment | Artikel Nr.: (Im Set: 10 Stifte; 1 Vorbohrer, 1 Peeso-Bohrer; 1 Steckschlüssel) | 6102 Sortiment | 6103 Sortiment | 6104 Sortiment | 6105 Sortiment | 6106 Sortiment | 6107 Sortiment |

| Peeso-Bohrer | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | D (mm): | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| | L (mm): | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 |
| UpM (max): 1.200 | Artikel Nr.: (6 Peeso-Bohrer) | 183.15. 090 | 183.19. 090 | 183.15. 110 | 183.19. 110 | 183.15. 130 | 183.19. 130 |

| Vorbohrer | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | D (mm): | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,65 | 1,65 |
| | L (mm): | 9 | 16 | 10 | 16 | 12 | 16 |
| UpM (max): 1.000 | Artikel Nr.: (3 Vorbohrer) | 6320 | 6321 | 6322 | 6323 | 6326 | 6327 |

| Steckschlüssel | | | |
|----------------|-----------------------------|------|------|
| | Artikel Nr.: (3 Steckschl.) | 6150 | 6151 |